

Vanliga frågor om Nelli® för patienten

Hur fungerar Nelli®?

Systemet känner igen anfall (och andra avvikande rörelser) och markerar dem så att läkaren kan undersöka dem vidare.

Var lagras informationen?

All information lagras lokalt. Endast relevanta data som misstänks innehålla epileptiska händelser och anfall lagras och överförs till Nelli® molntjänsten för analys; detta görs mycket säkert sätt.

Kan någon hacka systemet?

Vi tar säkerhet på stort allvar. Alla åtgärder har vidtagits för att det inte ska hända.

Behöver systemet anslutas till internet via WIFI eller kabel?

Nej, systemet ansluts automatiskt via ett inbyggt 4G modem.

Vem kommer att se videon?

Endast experter som utsetts av Neuro Event Labs har tillstånd att se inspelningarna för att granska och utvärdera resultaten för att öka rapportens exakthet. Rapporten levereras till läkaren. Rapporten innehåller endast anfallen och andra medicinska resultat.

Är kameran på hela tiden?

Inspelningen styrs av patienten/vårdgivaren. Under inspelning lagras bara inspelningen när ett epileptiskt symptom eller ett anfall misstänks.

Ska jag försöka gå och lägga mig om jag känner att ett anfall är på gång på dagtid?

Nelli® fångar anfall som uppstår när du sover eller ligger i sängen enligt din vanliga rytm. Men om du känner att ett anfall kommer och kan ligga i din säng, skulle det vara till stor hjälp.

Kameran kommer att vara bredvid min säng. Är det bullrigt?

Du kan höra ett lågt surrande ljud, som från en bärbar dator.

Kan jag lämna rummet, till exempel för att gå på toaletten under inspelningen?

Ja, absolut. Systemet är utformat så att det inte stör dina dagliga aktiviteter. Inga resultat kommer att fångas under din frånvaro från sängen, men det stör inte inspelningen eller analyserna heller.